

TurnAid Glidelagen

Materiale: 100% Nylon



Anvendelse:

TurnAid glidelagen bruges i forbindelse med TurnAid vendesystem T2 og T3.

Montering:

TurnAid glidelagnet monteres direkte på madrassen.

Bred glidelagnet ud på madrassen og placer det med syningerne nedad.



Før elastikkerne fra hjørnerne af glidelagnet omkring madrassens 4 hjørnerne.
Glat overfladen af glidelagnet til så det ikke folder og krøller.



Luk velcro bænderne sammen omkring de bevægelige dele under madrassen.

VIGTIGT! Monter ikke velcro bænderne omkring sengerammen, da bænderne ellers vil springe når sengens ryg, knæ og fodende hæves.

Bænderne er lange nok til også at passe til ekstra tykke madrasser.
Overskydende velcor bændel klippes af så det ikke sidder i vejen.

Vaske anvisning:



95° maskinvask



Tørretumbling ved normal temperatur



Tåler ikke strygning

Tåler ikke skyllemiddel.