

TurnAid Vendelagen

Materiale: 100% Bomuld



Anvendelse:

TurnAid vendelagen bruges sammen med TurnAid glidelagen til TurnAid vendesystem T2 og T3, og monteres på systemets 2 motorruller.

Montering:

Tænd for TurnAid.

Vend begge sider af systemet, så begge motorruller vender opad.

Drej de enkelte motorruller, så velcro-båndet herpå sidder på oversiden af rullen.

Placer vendelagenet midt på sengen med velcro-båndene i hver side af lagenet henad langs rullerne – husk at vende vrangen på lagenet nedad, således at velcro-båndet på siden af lagenet vender nedad.





Tag hjørnet af lagenet, start ved hovedenden og fastgør velcro-båndet på lagenet til velcro båndet på rullen med en glidende bevægelse, mens hånden glatter lagenet ned til fodenden.





Lagenet skal vende med oversiden op for at sikre den rigtige retning på lagenet, når rullerne kører. Hvis man monterer det forkert, er der fare for, at borgerens arme, fingre o.a. kan spoles ind imellem lagenet og rullen. Styringen har kun lille kraft til motorer i slækretningen, og vil slå fra, hvis der kommer belastning i denne retning.



Kør ca. 3/4-del af lagenet ind på den pågældende motorrulle ved tryk på  eller .

Tryk vendelagenet fast på velcro-båndet på samme måde på den modsatte motorrulle.



Kør vendelagenet ind på denne motorrulle ved tryk på  eller  indtil det ligger glat på madrassen med den grønne markeringsstribe midt på madrassen.

Det anbefales, at den grønne markeringsstribe på lagenet, så vidt muligt, er placeret midt på madrassen. Dette sikrer lige meget lagen i begge sider.

Vaske anvisning:



80° maskinvask. Krympning ca. 4%



Tørretumbling ved normal temperatur



Strygning ved normal temperatur