

HANDBEDIENUNG


ON Lichtdiode wird gelb, wenn das System aktiv ist. Falls das System nicht aktiv ist, erlischt die Lichtdiode.

ON Taster: Für Systemaktivierung durch 2 x definierte Drücken (je von 1 Sekunde) nach einander.

ON Taster funktioniert auch als Not-schalter durch 1 langes Drücken von mehr als 2 Sekunden. Der Taster ist auch für Reaktivierung nach TIME-OUT.

SLEEP Taster: 2 x Drücken von **SLEEP** Taster zwingt das System in Stand-By. Ist z.B. anzuwenden, wenn man das Lokal verlassen will, ehe das System in Stand-By gegangen ist.

SLEEP Taster funktioniert auch als Notschalter und zwar bei 1 langes Drücken von mehr als 2 Sekunden.

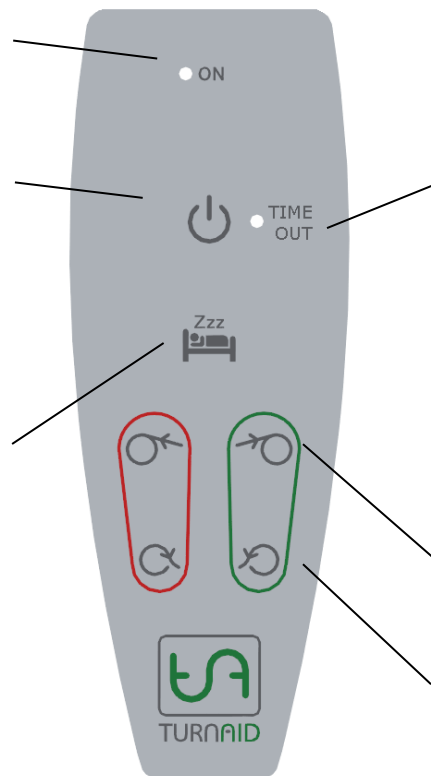

TIME OUT Lichtdiode blinkt, wenn das System mehr als 80 Sekunden aktiv gewesen ist, und das System erzeugt einen Bip-Ton, und die Rollen können immer noch betätigt werden.

Das System kann jetzt wieder reaktiviert werden durch 1 x Drücken des **ON** Tasters. Erfolgt keine Reaktivierung, wird die Lampe nach 10 Sekunden dauerhaft leuchten, und das System kann nicht betätigt werden, ehe es wieder reaktiviert wurde. Findet keine Reaktivierung statt, erlischt das ganze System nach weiteren 60 Sekunden.

Bedienungstaster für rote bzw. grüne Motorrolle -> Einwickeln von Wendelaken.

Bedienungstaster für rote bzw. grüne Motorrolle -> Abwickeln von Wendelaken.

FUßBETÄTIGUNGEN




Bedienungsschalter für rote bzw. grüne Motorrolle -> Einwickeln von Wendelaken = äußerster linker und rechter Fußschalter.



Bedienungsschalter für rote bzw. grüner Motorrollen -> Abwickeln von Wendelaken = zweitäußerster linker und rechter Fußschalter.

ON Drucktaster = mittlerer Schalter der Fußbetätigungen.


ERLEUTERUNG ZU ANDEREN PIKTOGRAMME

Pictogram	Benennung	Beschreibung
	CE Marke	Marke zeigt an, dass CE Markierung für das System ausarbeitet ist. Übereinstimmungserklärung finden Sie später in dieser Anleitung.
	Elektroniksrott	Das Symbol zeigt an, dass das System nach beendeter Anwendung bei der nächsten Wiederverwendungsstation für Wiederverwendung oder für Beseitigung nach geltendem Gesetz abzuliefern ist.
	Dichtungsgrad/ Schutzgrad	Dichtungsgrad IPX4 => Nicht spritzest und nicht geeignet für Außengebrauch.

DIE DREI POSITTIONE

für Step-by-Step Anleitungen – siehe Kapitel 5 in der Anleitung

1: Arbeitsposition (während Wenden)

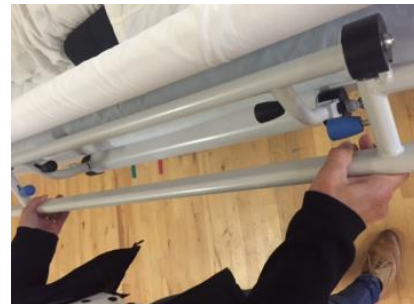

2: Heruntergeschlagene Position (das Bett-verlassen-Position)



3: Seitengitter-Position (während Wenden)

