

TurnAid Transport- og monteringsvogn

Praktisk transportvogn til nem transport af TurnAid-vendesystem.

Hjælper ved montering på eller afmontering af TurnAid på en plejeseng.

Praktisk designet med en indrammet bundplade til at placere kontrolboksen, fodbetjening, værktøj, tilbehør og reservedele.

Smal nok til at gå igennem enhver dør.

Reducer løftningen af TurnAid.

Montering:

På hver side af vognen hænges en TurnAid side.

Start med at montere de øverste bolte på TurnAid-sidens bagmonteringsplader.

Placer TurnAid-vognen med TurnAid siden så tæt på plejesengen som muligt.

Løft plejesengen, så sengerammen kører op i TurnAid beslagene.

Hjælp TurnAid-siden fra vognen til plejsengens ramme, og monter beslaget med den nederste bolt på beslaget og bagpladen.

Spænd alle bolte.



Varenr.: 6003
Mål: 110x100x40 cm
Vægt: 17 kg

