

## QUICK GUIDE TIL FLOORBED 2



Håndbetjening med "sikkerhedsnøglen" som sidder på ledningen.

Sikkerhedsnøgle

### Håndbetjeningen:

Når sengen er tilsluttet en stikkontakt og strømmen er tændt, er der ORANGE lys ved "power on". Når strømmen er tændt og der kun er orange lys, vil håndsættet være i en 'låst tilstand'.

Funktionerne kan låses op ved hjælp af sikkerhedsnøglen. Denne nøgle kan findes sikret på håndsættet. For at aktivere håndsættet skal sikkerhedsnøglen skubbes over den nederste del af håndsættet, som vist med den røde prikkede boks på diagrammet. Der er forskellige niveauer af



funktionalitet til at låse op, afhængigt af hvor mange gange nøglen er skubbet henover håndsættet. Funktionsniveauerne er som følger:

**1. Sikkerhedsnøglen skubbes 1 gang** - Indikator for låsning af håndbetjeningen lyser GRØNT. Knapperne 1 til 8 aktiveres, som omfatter ryglæn, bendel, gulv-niveau-funktion og omvendt Trendelenburg. Hvis 8 aktiveres, så gøres sengen lige ved at køre helt op med 5 eller ned med 6.

**BEMÆRK:** Trendelenburg-funktionen (knap 9) forbliver låst.

**2. Sikkerhedsnøglen skubbes 2 gange** - Indikatorens låseknapindikator lyser ORANGE. Alle 9 knapper bliver nu aktiveret, herunder Trendelenburg. Hvis håndbetjeningen ikke er brugt, vil den automatisk låses efter en forudindstillet tid. Håndbetjeningens låseindikator slukker, og alle funktioner låses.

**3. Sikkerhedsnøglen skubbes 3 gange** - Håndlåsens statusindikator lyser ikke. Håndbetjeningen er nu helt låst.

**BEMÆRK:** Hvis patienten ikke kan betjene sengen sikkert, skal du låse håndbetjeningen ved hjælp af sikkerhedsnøglen umiddelbart efter hver brug. (Sikkerhedsnøglen kan være nødt til at blive skubbet to gange for at låse helt. Se 1 - 3 ovenfor. Fuld lås er bekræftet ved at låseindikatoren slukker

**Sikkerhedsstops-position** - er den position, som sengen stopper i, når sengen sænkes med knappen 6. For at sænke sengen til gulvniveauet, se instruktionerne nedenfor:

For at bruge gulv-niveau funktionen:

1. Kontroller under sengen for at sikre, at der ikke er nogen hindringer eller noget der kan blive klemmt under sengen.

2. Når du sænker sengen, skal du sørge for at brugeren eller patienten holder hænder og ben væk fra madrassens kant.

3. Lås håndbetjeningen op med sikkerhedsnøglen, hvis den er låst.

4. Tryk på knappen 6 for at sænke sengen, indtil den når sikkerhedsstoppositionen (ca. 20cm).

5. Tryk på knapperne 6 og 7 sammen. Sengen vil nu bevæge sig ned til gulv-niveau-stillingen.

**BEMÆRK:** Hvis begge knapper slippes, stopper sengen straks.

6. Når sengen har nået den ønskede højde, lås evt. håndbetjeningen og opbevar håndbetjeningen på et sikkert sted.